

## **Használati utasítás: CALPLUS**

**Jodoformos többcélú kalcium-hidroxidos ideiglenes gyökértömő és pulpasapkázó anyag, röntgenárnyékot ad.**

### **Használati utasítás:**

**Kavítás bélelés, indirekt pulpasapkázás:** . Vigyen fel az anyagból egy vékony réteget a dentinre, szárítsa lassú légárammal, amíg az anyag krétafehér nem lesz (30 mp.), távolítsa el a szélekről.

Amennyiben üvegeionomert és dentin ragasztó anyagokat használ, helyezze a CALPLUS-t a kavítás legmélyére, szabadon hagyva a szemben lévő falakat a ragasztáshoz.

**Élő pulpa kezelése:** A CALPLUS egyenesen a pulpára vihető fel, mind a pulpasapkázásnál, pulpotómiás eljárásnál. Az anyag a pulpát stimulálja, egy új dentin hidat képez, ami klinikailag látható válik kb. 2-3 hónap után és visszazárja a pulpát a saját természetes csatornájába.

**Utasítások direkt pulpasapkázáshoz:** Vigyen fel egy vékony réteget a teljes szabad dentinre és szárítsa meg lassú légárammal, helyezzen 2 mm vastag réteget közvetlenül a szabad pulpa fölé és szárítsa lassú légárammal. A CALPLUS nem köt keményre. Óvatosan nyomja meg a pasztát egy vattagolyóval, hogy biztosan érintkezzen a pulpával.

Helyezzen egy vékony réteg keményre kötő cementet a CALPLUS-ra.

A cement megkötése után fejezze be a restaurációt.

**Gyökércsatorna kezelése:** A CALPLUS használható ideiglenes gyökérkezelő pasztaként kezelések közötti időszakban vagy összetett esetekben, amik hosszantartó kalcium-hidroxid kezelést igényelnek. Használja rendszeresen, mint baktericid, bakteriosztatikus csatornabélelő, illetve cisztáknál, lézióknál, stb.

**Utasítások gyökércsatorna kezeléshez:** Preparálja és tisztítsa meg a csatornát a hagyományos módon, töltsen meg a csatornát CALPLUS-al, zárja a nyílást az ön által használt cementtel. A CALPLUS könnyen eltávolítható idegtűvel, a hosszantartó gyökérkezelést igénylő esetekben lehetőség szerint havonta cserélje az anyagot.

Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó (S1/2),

Kerülni kell a bőrrel és a szemmel való érintkezést (S24/25),

Szem- és bőrizgató hatású (R36/38) Súlyos szemkárosodást okozhat (R41)

**Kizárólag fogászati használatra!**

**Forgalmazó: PÁL DENTAL RT 1085, Budapest, Pál u. 2. Tel: 318-8953, 317-2195,**

**Fax: 318-5295, email: paldental@paldental.hu**