

CITODUR (lágú és kemény) használati útmutató

Termékleírás:

A Citodur nedvesség hatására keményedő, kavitások ideiglenes lezárására szolgáló anyag.

Felhasználási területek: ideiglenes tömések készítéséhez

Felhasználás: Megfelelő eszközzel a szükséges mennyiséget a még nedves kavitásba kell behelyezni.

Az anyag néhány perc múlva megkeményedik.

Ezt követően 15 percig a rágás kerülendő.

Mély kavitásokat nem kell teljesen kitölteni.

Ügyelni kell a záráskor arra, hogy az alkalmazandó gyógyszerek lehetőleg nyomásmentesen kerüljenek felhasználásra.

Az ideiglenes tömés eltávolításához előzetesen fogászati fúró alkalmazása válhat szükségessé, ezt követően a tömések szondával eltávolíthatók.

Utasítások: A nedvesség érzékenység miatt az üveget az anyag kivétele után azonnal le kell zárni.

Ellen javallatok: egyes erre érzékeny személyeknél a termékkel szembeni érzékenység nem zárható ki.

Amennyiben allergiás reakciók lépnek fel, úgy az alkalmazást meg kell szüntetni.

Tárolás és eltarthatóság: A termék száraz helyen tartandó, 25 C° felett nem tárolható.

A szavatossági idő lejártá után tilos a használata.

Megsérült csomagolású anyagot mihamarabb fel kell használni.

Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó (S1/2),

Az edényzet légmentesen lezárva, szárazon tartandó (S7/8)

Kizárólag fogászati használatra!

Forgalmazza: PÁL DENTAL RT, 1085 Bpest, Pál u. 2. T:317-2195, 318-8953

Fax:318-5295