

**CHEMGENE HLD4H WIPES HASZNÁLATI UTASÍTÁS**  
**Véreltávolító hatású felületfertőtlenítő-szerrel átitatott kendő**

**Antimikrobális spectrum:**

baktericid (MRSA), yeasticid, mikobaktericid, sporocid, szelektív virucid (HepB, Herpes simplex, HIV, norovírus inaktiváló)

**Behatási idők:**

Baktericid és MRSA baktericid, yeasticid, sporocid, Hepatitis B, Herpes Simplex vírus inaktiváló hatás elérése: - 5 perc

mikobaktericid hatás elérése: - 30 perc

HIV, norovírus inaktiváló hatás elérése: - 60 perc

**Használati utasítás:**

A fertőtlenítőszerszel átitatott törőkendővel alaposan át kell törölni a fertőtleníendő felületet, úgy, hogy kezeletlen részek ne maradjanak.

A készítményt hagyni kell a felületre rászáradni.

A behatási idő alatt a felületnek nedvesnek kell maradnia.

A behatási idő letelte után szükség esetén vízzel öblíthető a felület.

**Összetétel:**

**Biocid hatóanyag:** didecil-dimetil-ammoniumklorid (CAS: 7173-51-5), benzalkónium-klorid (CAS: 68424-85-1), bis (3-aminopropil)-dodecilamin (CAS: 2372-82-9)

**Egyéb összetevők:** cocamidopropil-betain, alkil-poliglukozid, alkohol-etoxilát, egyéb összetevők, víz

**Terméktípus:** PT 2.

**Egyéb figyelmeztetések:** Más tisztító-és fertőtlenítőszerszel együtt alkalmazni tilos!

**Elsősegélynyújtás:** Bőrrel való érintkezés esetén az érintett bőrfelületet enyhén szappanos vízzel alaposan le kell mosni. Szemmel való érintkezéskor a szemet alaposan ki kell öblíteni, irritáció esetén orvoshoz kell fordulni.

**Hulladékkezelés:** A termék maradékainak és csomagolási hulladékainak kezelésére a vonatkozó rendeletben foglaltak az irányadóak.

**Környezetvédelem/ökotoxikológia:** Kerülni kell a készítmény élővízbe, talajba, illetve hígítás nélkül a közcatornába jutását.

**Szennyezés-mentesítés:** A környezetbe került anyag mechanikusan takarítható fel, a felszedett kendőket az ártalmatlanításig megfelelő tároló edényzetbe kell helyezni.

A szennyezett terület vízzel takarítható fel.

**Tárolás, eltarthatóság:** Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, száraz, hűvös jól szellőztethető helyen 2 évig eltartható.

**Kiszerezési egység:** 100 db-os, vagy 200 db-os doboz

**Gyártja:** MEDIMARK SCIENTIFIC LTD., Est Point High Street, Seal, Kent, TN15 0EG, Egyesült Királyság.

**Forgalomba hozza:** PÁL DENTAL ZRT 1085 Budapest, Pál u. 2.

Tel: (+36-1) 317-0927, (+36-1)318-8953, Web: [www.paldental.hu](http://www.paldental.hu),

Email: [paldental@paldental.hu](mailto:paldental@paldental.hu)

OTH engedély szám: JKF/14624-3/2015