

# REPROCHEM MANUAL DISINFECTANT HLD4I



**Reprochem Manual HLD4I** Nagy hatékonyságú, eszköz- és műszerfertőtlenítő koncentrátum

**Használati utasítás:**

**Hígítási arány :** 5% os oldat - 1:20 (950 ml vízhez adjon 50 ml koncentrátumot)

**Tisztítás és fertőtlenítés:**

A készítmény **véroldő hatású**, de erős vérszennyezés esetén, amennyiben szükséges szedje szét (endoszkóp stb.) az eszközt és tisztítsa Reprochem Manual Enzimes tisztítóval, vagy mechanikusan kefével, ellenkező esetben az fertőtlenítő oldat hamar kimerül.

Merítse az eszközt a folyadékba. A behatási időt követően öblítse le és szárítsa meg.

Az elkészített oldatot 14 nap elteltével, vagy zavarossá válás esetén cserélje ki.

**Véroldő hatás:** Vérrel, váladékkal fertőzött műszereken: 5%-os oldat - 1:20, 10 perc

(a vérrel, szövetváladékkal kontaminálódott felületeket közvetlenül a kontaminálódás után kell kezelni Reprochem Manual HLD4 oldattal)

**Behatási időök:**

Baktericid és fungicid hatás

5%-os oldat - 10 perc

Virucid hatás

5% os oldat - 10 perc

Mycobaktericid hatás

5%-os oldat - 10 perc

Sporocid hatás

5 %-os oldat - 10 perc

**Összetétel:**

Klórhexidin oldat 20% 18472-51-1 3% > 6% R:10 -22, S: 26-36, Dimethyldidecylammonium klorid 8030-78-2 2% > 4% R:10-22, R:10-22

Alkylbenzylidimethylammonium C chloride 8001-54 -5 2% > 4%

**Veszély azonosítása:**

R36/38 Szem és bőrizgató hatású

**Elsősegély nyújtási rendelkezés:** S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet, S36-37 Ha szembe jut bő vízzel ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni, Megfelelő védőkesztyűt kell viselni. Belégzés Irritálhatja a nyálkahártyát. Menjen friss levegőre. Szembe kerülés Irritálhatja a szemet. Öblítse azonnal bő vízzel a nyitott szemet 15 percig. Keresse fel szakorvosát, ha a tünetek megmaradnak. Bőrre kerülés Irritálhatja a bőrt. Mossa le azonnal bő vízzel és szappannal. Távolítsa el a szennyezett ruhadarabot. Keresse fel szakorvosát, ha a tünetek megmaradnak. Lenyelés Irritálhatja a nyálkahártyát. Ne erőltesse a hányást. Keresse fel szakorvosát, ha a tünetek megmaradnak.

**Tárolás, eltarthatóság:** Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, száraz, hűvös, de jól szellőztethető sötét helyen, 0 °C -30 °C közötti hőmérsékleten, lásd a flakonon

**Tűzveszélyességi osztály:** „E” Nem tűzveszélyes

**Ökotoxicológia:** Szabályszerű alkalmazás mellett káros hatása nincs. A készítmény maradékait illetve csomagolóanyagát nyílt vízbe, talajba juttatni tilos, a készítményt csak vízzel hígított állapotban szabad a csatornába juttatni.

**Kiszerezési egység:** 2l-es folyékony koncentrátum

**Forgalomba hozza:** PÁL DENTAL ZRT 1085 Budapest, Pál u. 2. Tel: 317-0927, 318-8953